



No. VL01-0000000909

2026 年 1 月 9 日

お客様各位

株式会社ベリタス

バイオサイエンス本部

技術グループ マネージャー 横沢 佑弥

製品担当 山本 希

LABType 解析用カタログファイル更新に関するお知らせ (3.61.0)

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。

One Lambda より HLA 解析用ソフトウェア「HLAFusion」の最新の血清型ファイル (IMGT/HLA 3.61.0) がリリースされました。それに伴い、HLA タイピング試薬「LABType」の測定データを解析するためのカタログファイルも更新されました。詳細は下記をご確認の上、カタログファイルの更新をお願いいたします。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。今後とも弊社及び One Lambda 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品】

LABType SSO、CWD の各製品

【更新内容】

- ・血清型ファイル更新に伴うアレル情報更新 (3.59.0→3.61.0)

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076 1 / 2

- ・ビーズ情報の変更（一部抜粋）

特に JSHI（日本組織適合性学会）精度管理委員会が主催している QCWS において、偽陽性（FP）・偽陰性（FN）等の指摘のあったビーズについて、変更点を下記に記載いたします。

製品名	ロット	ビーズ#	変更内容
LABType CWD A locus	007, 008	843	対象アレルに A*24:20 を追加
LABType CWD C locus	003	744	C*14:03 を含む場合に偽陰性となる可能性*
		807	カットオフ値を 15→20 に変更 (C*12:02:02 は陽性→陰性)
	004	648	C*14:03 を含む場合に偽陰性となる可能性*

*3.59.0 に引き続き Bead/Probe info 資料の note に注釈として記載

詳細はメーカー発行の Bead/Probe info 資料をご参照ください。

【更新方法】

弊社ウェブページ (https://www.veritastk.co.jp/hla/setting_file_fusion_catalogue.html) よりお使いの試薬

およびロットに対応したカタログファイルをダウンロード後、HLA Fusion にインポートしてください。

インポート方法は下記資料をご参照ください。

https://www.veritastk.co.jp/hla/pdf/CatalogFile_Import.pdf

ご不明な点がございましたら、技術グループ（03-5776-0040 または tech_support@veritastk.co.jp）まで
お問合せ下さい。

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076