



No. VL01-0000000974

2026 年 7 月 30 日

お客様各位

株式会社ベリタス

バイオサイエンス本部

技術グループ マネージャー 横沢 佑弥

製品担当 山本 希

LABType 解析用カタログファイル更新に関するお知らせ (3.63.0)

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。

One Lambda (ThermoFisher Scientific 社) より HLA 解析用ソフトウェア「HLA Fusion」の最新の血清型ファイル (IMGT/HLA 3.63.0 : 2026 年 1 月バージョン) がリリースされました。それに伴い、HLA タイピング試薬「LABType」の測定データを解析するためのカタログファイルも更新されました。詳細は下記をご確認の上、カタログファイルの更新をお願いいたします。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。今後とも弊社及び One Lambda 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品】

LABType SSO、CWD の各製品

【更新内容】

- ・血清型ファイル更新に伴うアレル情報更新 (3.61.0→3.63.0)
- ・ビーズ情報の変更 (一部抜粋)

特に JSHI (日本組織適合性学会) 精度管理委員会が主催している QCWS において、偽陽性 (FP) ・偽陰性 (FN) 等の指摘のあったビーズについて、変更点を下記に記載いたします。

製品名	ロット	ビーズ#	変更内容
LABType CWD C locus	003	744	C*14:03 を含む場合に偽陰性となる可能性*
	004	648	C*14:03 を含む場合に偽陰性となる可能性*

*3.59.01 バージョンより継続して Bead/Probe info 資料の note に注釈として記載
詳細は One Lambda 発行の Bead/Probe info 資料をご参照ください。

【更新方法】

弊社ウェブページ (https://www.veritastk.co.jp/hla/setting_file_fusion_catalogue.html) よりお使いの試薬およびロットに対応したカタログファイルをダウンロード後、HLA Fusion にインポートしてください。
インポート方法は下記資料をご参照ください。

https://www.veritastk.co.jp/hla/pdf/CatalogFile_Import.pdf

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076 1 / 2

ご不明な点がございましたら、技術グループ（03-5776-0040 または tech_support@veritastk.co.jp）まで
お問合せ下さい。

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076