



VL01-000000588

2023年2月22日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
技術グループ

マネージャー 横沢 佑弥
担当 藤原 千恵
(TEL:03-5776-0040)

LABScreen 製品に関するお知らせ

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。

LABScreen 製品を専用ソフト HLA Fusion で解析をした際の解析結果の表示につきまして、過去にご案内をしておりました情報に誤りがありましたので下記の通り訂正をさせていただきます。

ご不明な点がございましたら、技術グループ(03-5776-0040 or tech_support@veritastk.co.jp)までお問合せ下さい。

今後とも弊社及び One Lambda 製品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

x4 と x2 の判定基準を検体内で 1 番高いピーズの蛍光値の 15%以上、10%以上とご案内しておりましたが、正しくは 5%以上、2%以上となります。

なお、HLA Fusion の自動判定を解析に使用していない施設様は、本変更内容に伴う結果への影響はございません。

判定基準	正	誤
x8	70%	70%
x6	30%	30%
x4	5%	15%
x2	2%	10%

【対象商品】

- LABScreen Single Antigen
- LABScreen Single Antigen Supplement
- LABScreen Single Antigen ExPlex
- LABScreen PRA

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

www.veritastk.co.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076