

# Quick Profile™ -3 研究用

(尿中薬物簡易スクリーニングキット)

この製品は判定領域に**赤い線が現れた場合が陰性**です。

**DRUGS OF ABUSE  
PANEL TEST CARD**

ID: \_\_\_\_\_ CE

AMP MET THC PH CR

C T C T

S S

NEG POS INVALID

コントロール

判定領域


尿を **3** 滴加え、  
**20 秒** ~  
**1 分** 以内に判定

尿を **3** 滴加え、  
**5 分** ~ **10 分** 以内に  
判定領域の赤色バン  
ドの有無を確認  
泡は滴下しないよう  
注意

**尿中異物混合物試験領域**

	異常	← 正常範囲 →					異常
PH							
(尿中クレアチニン) CR							

◎判定については裏面を参照して下さい

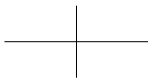

## < 判定 >

- 判定領域とコントロールともに赤い線が確認されたら陰性（薬物は存在しない）。
- 赤い線が現われず、コントロールにのみ赤い線が確認された場合は尿中にその薬物 / 薬物代謝物が一定の濃度以上存在する可能性を示唆しています。陽性あるいは擬陽性の結果となった場合は GC/MS のような特異性の高い定量性のある方法で確認試験を行ってください。
- コントロールの線が現われない場合はその試験は無効ですので、やり直してください。
- 10 分以上経過したものは判定できません。
- 尿検体の状態を pH、尿中クレアチニンで確認できます。
- 常温保存品、18 ヶ月有効。



株式会社

**ベリタス**

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14  
 住友東新橋ビル3号館5階  
 TEL.03-5776-0078(代) FAX.03-5776-0076  
 E-mail: veritas@veritastk.co.jp  
<http://www.veritastk.co.jp/>

BLQI-17-0615  
 (17.07.XX)

