

VERITAS PRODUCT

尿中薬物簡易スクリーニングキット

Quick Profile™ -8

AMP/BAR/BZD/COC/OPI/PCP/TCA/THC

検出用キット

尿中クレアチニン確認試験付き

DRUGS OF ABUSE
PANEL TEST CARD

ID: _____ CE

T1 AMP BAR BZD COC
T2 OPI PCP TCA THC CR

コントロール
判定領域

尿サンプルを3滴滴下して、5分後から10分以内に判定領域の赤色バンドの有無を確認

尿中異物混合物試験領域：
尿を3滴加え、20秒から1分以内に判定

カットオフ値

AMP	1,000 ng/mL
BAR	300 ng/mL
BZD	300 ng/mL
COC	300 ng/mL
OPI	300 ng/mL
PCP	25 ng/mL
TCA	1,000 ng/mL
THC	50 ng/mL

- 尿を滴下し、5 - 10分以内に乱用薬物を検出する簡易スクリーニングキットです。判定領域とコントロールともに赤い線が確認されたら陰性（薬物は存在しない）、赤い線が現れず、コントロールにのみ赤い線が確認された場合は尿中にその薬物が一定の濃度以上存在する可能性を示しています^(*)。コントロールの線が現れない場合はその試験は無効ですので、やり直してください。
- 尿サンプルの状態を、尿中クレアチニン確認試験で同時に確認できます。
- イムノクロマト法により高感度で信頼性の高い結果が迅速に得られます。
- 室温保存品（15 - 30℃）、18ヶ月有効。

(*) 陽性あるいは擬陽性の結果になった場合、GC/MSなど特異性が高く定量性のある方法で確認試験を行って下さい。

商品コード	商品名	梱包単位	希望小売価格
LMQ-74010-TC-1A	QuickProfile-8 異物確認試験付	10 テスト / 箱	¥ 19,000

※上記価格は、2017年10月1日からの価格（税抜）です。価格は予告なく変更される場合がございます。ご了承下さい。

株式会社

ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14
住友東新橋ビル3号館5階
TEL.03-5776-0078(代) FAX.03-5776-0076
E-mail: veritas@veritastk.co.jp
<http://www.veritastk.co.jp/>

製造元：

Lumiquick Diagnostics, Inc
2946 Scott Blvd. Sant Clara, CA 92618 USA

BLQF-17-0650